



Ahora, limpiar es mucho más fácil.

Le presentamos la forma más rápida, fácil y efectiva de limpiar equipos CPAP. SoClean elimina el 99,9 % de los gérmenes y bacterias de CPAP de la máscara, la manguera y el depósito.

SoClean.



“¡Ahora realmente uso mi CPAP todas las noches porque siempre está limpio!”

Bryon Farnsworth

El primer disolvente e higienizante CPAP automatizado

Después de una simple configuración, el SoClean higieniza y desinfecta la máscara, la manguera y el depósito CPAP: no requiere desmontaje, agua ni productos químicos agresivos. Su equipo CPAP permanece completamente seco.

El SoClean permite a cualquier usuario de CPAP limpiar e higienizar el equipo diariamente y de una forma segura y natural. Elimina el 99,9 % de los gérmenes y bacterias CPAP más comunes. Su CPAP ya estará listo para usar y podrá dormir toda la noche sin esfuerzo alguno.



■ SIN DESMONTARLO
Desinfecte todos sus equipos CPAP sin tener que desmontar la máscara, la manguera o el depósito CPAP.

■ ELIMINA GÉRMENES DEL EQUIPO CPAP
¡Elimina el 99,9 % de los gérmenes y bacterias CPAP de una forma natural, segura y sin utilizar agua ni químicos agresivos!

■ AHORRE TIEMPO
Limpiar el CPAP no le ocupará mucho tiempo. El SoClean automático lo hace por usted.

#SoCleanSoEasy



RECOMENDADO POR LOS MÉDICOS



HOMOLOGADO HSA/FSA #9274



PROBADO EN LABORATORIO INDEPENDIENTE



La solución más rápida, sencilla y efectiva.


Para las personas que buscan la mejor forma de mantener limpio el CPAP, el disolvente e higienizante CPAP automatizado SoClean es una solución muy efectiva y, además, es más rápido y sencillo que los demás métodos de limpieza.

El SoClean utiliza ozono, también denominado O_3 u oxígeno activado, para desinfectar el equipo CPAP. El ozono es un gas que se produce de forma natural, es 100 % seguro y se ha utilizado para purificar el agua desde el siglo XIX. En la actualidad, se trata de un proceso desinfectante de confianza que utilizan los hospitales, los manipuladores de alimentos y la industria hotelera.

Se ha demostrado que el ozono es efectivo en la destrucción de docenas de patógenos nocivos, incluidos E. coli, virus de la influenza, estafilococos, bacterias estreptocócicas, virus de la estomatitis y muchos más.

Además de ser muy efectivo, el SoClean es muy fácil de usar. Con un sencillo ajuste, los usuarios CPAP solo tienen que colcarse la máscara en el SoClean, cerrar la tapa y estarán listos. No es necesario desmontar la máscara, la manguera o el depósito de agua, ni tampoco utilizar agua, jabón, paños o agentes químicos. Cuando el SoClean haya acabado de desinfectar el equipo CPAP del usuario, estará completamente seco y listo para ser utilizado.

¿Cómo funciona el SoClean?

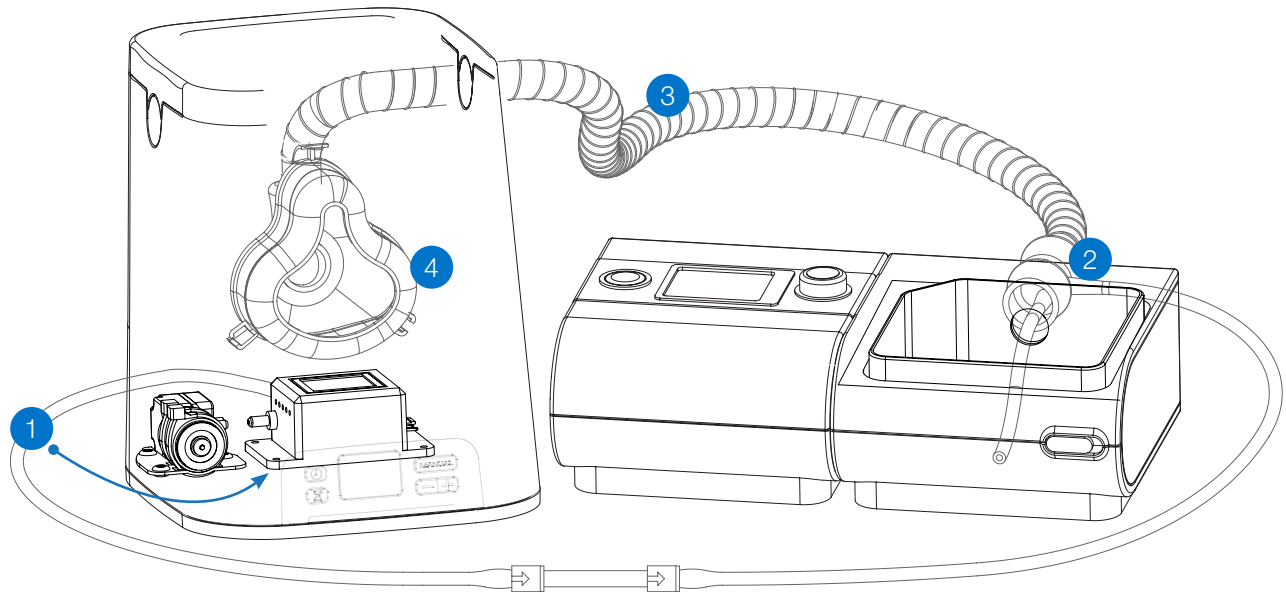

1. Generación de ozono

El SoClean genera ozono (O_3) y se bombea a través de la manguera de inyección de SoClean.

2. Desinfecta el depósito y el agua

El acople de inyección conecta el SoClean con el depósito CPAP. El ozono desinfecta todo el depósito y lo desinfecta todo, incluyendo el agua.

3. Desinfecta la manguera

El ozono es un gas que flota a través de la manguera, desinfectando todas las grietas.

4. Desinfecta el interior y exterior de la máquina

¡El ozono rodea la máscara CPAP, desinfectando el interior, el exterior y los auriculares!

¿Sabía que SoClean utiliza el mismo proceso de desinfección que en:



Purificación
de agua




Manejo
de productos



Limpieza
de hoteles



Desinfección
de hospitales



“El higienizante SoClean es absolutamente increíble. Solía sangrar de la nariz, lo cual provocaba la aparición de cicatrices en el interior de la nariz y ronquidos. Desde que utilizo el desinfectante SoClean, esos problemas ya se han acabado. Ahora duermo mucho mejor sabiendo que el 99,9 % de los gérmenes han sido eliminados y tiendo a dormir más horas desde que utilizo el desinfectante SoClean.

Limpia mi equipo requería mucho tiempo... El desinfectante SoClean elimina todos los problemas y los resultados son fabulosos. Estoy encantado con mi desinfectante SoClean.” - “T” Artis

El favorito para los usuarios de CPAP ★★★★★

“Empecé a explicar a todos los propietarios de cpap lo maravilloso que resulta no tener que preocuparse por sufrir infecciones respiratorias. Mi hija ha comprado uno para su marido y tengo varios amigos que están interesados. Gracias por diseñar un producto tan práctico y fácil de usar. Todas las mañanas, cuando acoplo la máscara al SoClean, quedó maravillado por su simplicidad. Bendita sea la persona que lo inventó”.

– Lori Cordes

El CPAP es fundamental a la hora de tratar la apnea obstructiva. El objetivo es que los pacientes con apnea obstructiva se sientan mejor y no peor. La mejor forma de prevenir una neumonía, una gripe u otras enfermedades infecciosas es mantener el CPAP limpio en todo momento. Sin embargo, algunos de los métodos de limpieza más recomendados no sirven.

Limpiar debe ser fácil. Esta es la filosofía en la que se basa el higienizador y desinfectante CPAP automatizado de SoClean. Para obtener más información sobre el mejor dispositivo de limpieza CPAP, visite SoClean.com.





¡Desinfecte su
equipo CPAP sin
utilizar las manos!

Contacto

SoClean Inc.
12 Vose Farm Road
Peterborough, NH 03458

Ventas (800) 747.1030
Asistencia (800) 341.7014
Intl +1(508) 363.0415

info@SoClean.com

SoClean.com

© 2018 SoClean® es una marca registrada propiedad de SoClean Inc. Todos los derechos reservados.
Patente europea núm. EP2731632 validada en Alemania, Albania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Malta, Polonia, Portugal, Gran Bretaña,
República Checa, Rumanía, Suiza, Suecia, Turquía, Noruega y Croacia, Patente de diseño núm. 002502583-0001;
Patente de diseño núm. 003438449-0001 y patente pendiente.